




**Qufora®** IrriSedo CaRe – Leggere le istruzioni per l'uso sul lato opposto della pagina

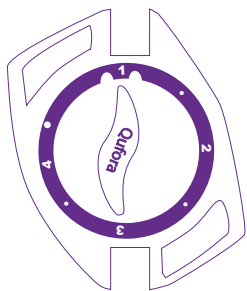

### SELETTORE

#### Posizione 1

Riempimento dei tubi con acqua e svuotamento del sistema dopo l'uso.

#### Posizione 2

Riempimento del palloncino con acqua per l'ancoraggio al retto.



#### Posizione 3

Immissione dell'acqua nel retto.

#### Posizione 4

Svuotamento del palloncino ed estrazione del catetere.

Il punto tra i numeri è un punto di stop.

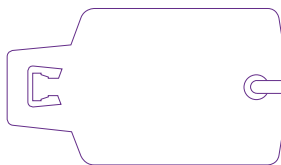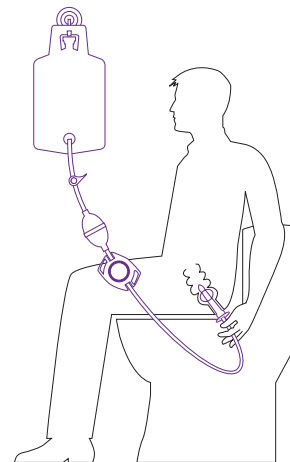


Sacca



Valvola



Pompa manuale

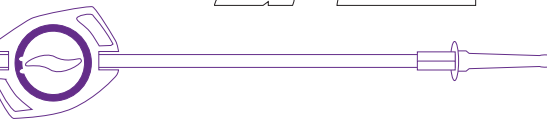


Selettore

Catetere rettale

Prima di cominciare, leggete attentamente le istruzioni d'uso.

**Qufora®** IrriSedo CaRe é distribuito da KilKo Srl. Contatta KilKo allo **051 6257612** o invia una mail all'indirizzo **info@kilko.it** per avere informazioni su prezzi del prodotto, disponibilità e tempi di consegna


# Qufora® IrriSedo CaRe – Istruzioni per l'uso

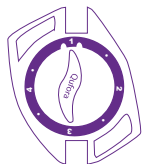

## Selettore


Durante la procedura ruotare il selettore in senso orario seguendo la numerazione 1, 2, 3 e 4.

1

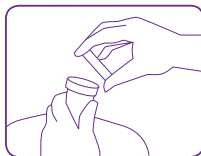


Riempite la sacca con acqua tiepida, (36-38 °C). Appendete la sacca all'altezza delle spalle o leggermente più in basso.

2

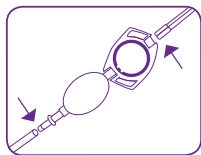


Collegate il tubo della sacca alla pompa. Collegate all selettore l'estremità bianca del tubo del catetere.

3

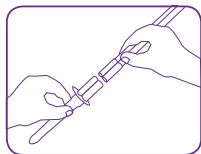

Inserite l'estremità grigia del tubo nel catetere.


4

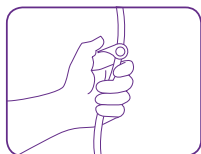

**Ruotate il selettore in posizione 1 e aprite il rubinetto.**

Assicuratevi che il catetere sia rivolto verso il basso.


5

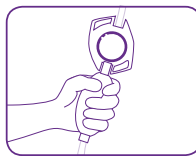

Per eliminare l'aria dal sistema, pompate l'acqua attraverso i tubi fino a che non comincerà ad uscire dal catetere. Assicuratevi di aver eliminato tutta l'aria.


**Ruotate il selettore sul punto tra le pos. 1 e 2 per mettere in pausa.**

6

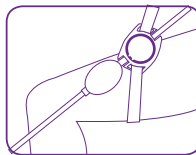

Potete fissare l'unità di controllo alla gamba con la fascetta in velcro.

7

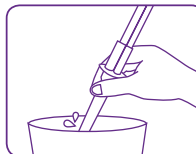


Immergete il catetere in acqua per attivare il rivestimento.

8



Inserite delicatamente il catetere nel retto.

9

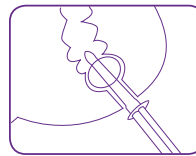


**Ruotate il selettore in posizione 2.**

Comprimete la pompa per riempire il palloncino d'acqua. Ginfiare il palloncino fino a che il catetere non si è ancorato saldamente.

**Ruotate il selettore sul punto di stop tra le posizioni 2 e 3.**


10

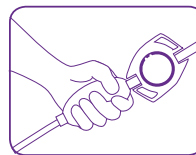

**Ruotate il selettore in posizione 3.**

Pompate lentamente l'acqua nell'intestino. Il medico o un operatore sanitario vi consiglieranno la quantità d'acqua da utilizzare.


11

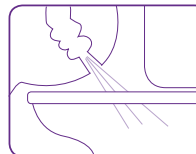

**Ruotate il selettore in posizione 4.**

Il palloncino si svuota e il catetere può essere rimosso. Restate seduti fino a che l'acqua e le feci non saranno espulse.

12

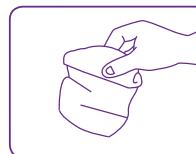

Riponete il catetere nel sacchetto di raccolta, sigillatelo e smaltitelo come normale rifiuto domestico.