



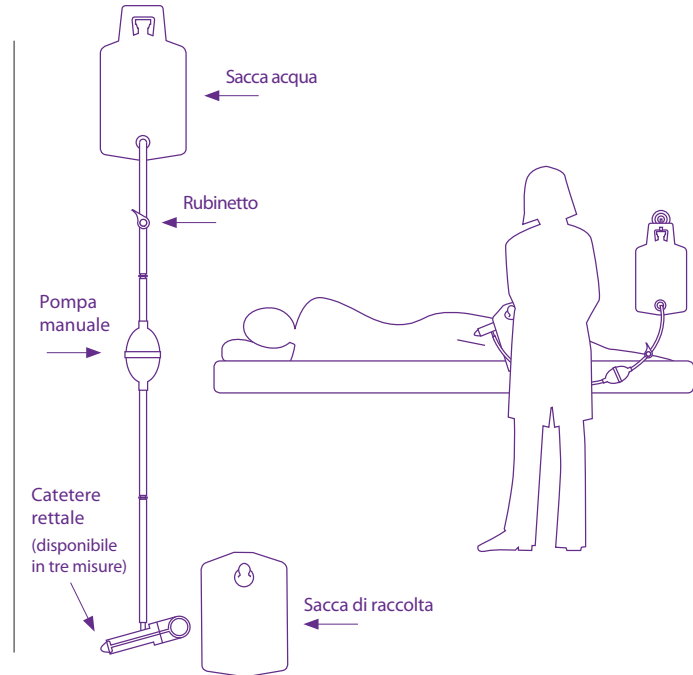

Qufora® IrriSedo Letto – Leggere le istruzioni per l'uso sul lato opposto della pagina

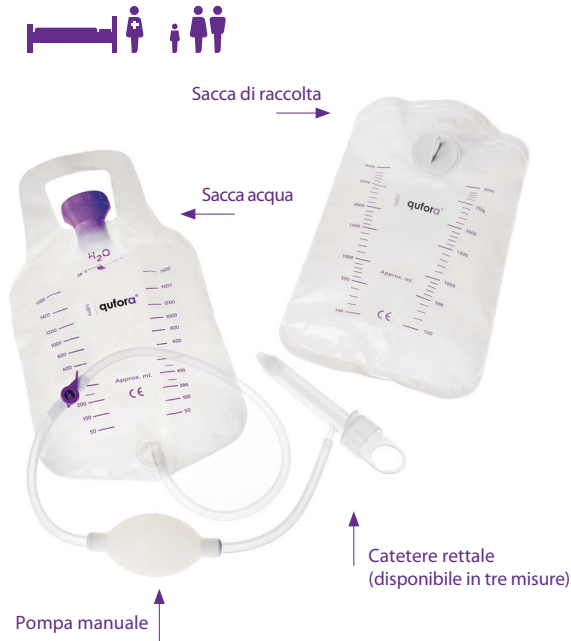

Qufora® IrriSedo Sistema Letto é distribuito da KilKo Srl. Contatta KilKo allo **051 6257612** o invia una mail all'indirizzo **info@kilko.it** per avere informazioni su prezzi del prodotto, disponibilit  e tempi di consegna

Questa guida   puramente indicativa. Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il foglietto illustrativo contenuto nella confezione.

Prima dell'uso


Preparate tutti i componenti del sistema e riempite la sacca con acqua di rubinetto tiepida.

Dopo l'uso

Pulite accuratamente tutti i componenti del sistema **Qufora®** IrriSedo Sistema Letto con acqua tiepida e sapone e metteteli ad asciugare al riparo dalla luce diretta dal sole. Lavate le mani.


Qufora® IrriSedo Letto – Istruzioni per l'uso

1

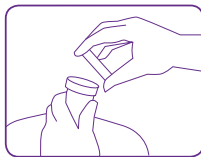

Riempite la sacca dell'acqua con acqua di rubinetto a 36°-38°. Usate il quantitativo di acqua necessario all'irrigazione. Appendete la sacca ad un'altezza di almeno 50 cm dal punto di irrigazione o più in alto.

2

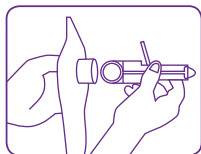


Fissate il catetere rettale, con la guida inserita, al dispositivo di ancoraggio della sacca di raccolta. Il catetere di diametro di 12 mm non ha la guida.

3




Collegate il tubo dalla sacca dell'acqua al catetere rettale.

4

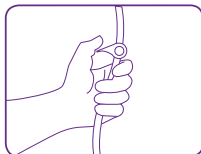


Aprirete il rubinetto e riempite d'acqua il sistema aiutandovi con la pompa, quindi chiudete il rubinetto.

5

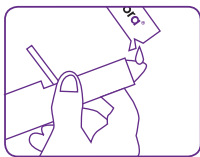


Lubrificare il catetere e la guida utilizzando il gel.

6

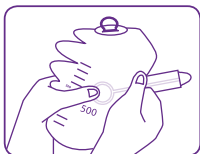


Utilizzando la sacca di raccolta, impugnate l'anello della guida di inserimento del catetere. La guida deve essere impugnata all'altezza della marcatura dei 500 ml.

7

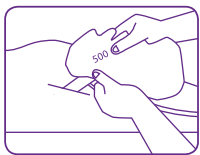


Con il paziente girato sul fianco sinistro e posizionato in prossimità del bordo del letto, inserite delicatamente il catetere nel retto, aiutandovi con la guida.

8

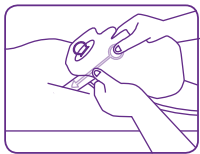


Una volta inserito il catetere nel retto, estraete la guida del catetere e lasciatela cadere all'interno della sacca di raccolta.

9

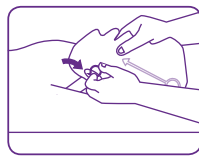

Collegate il tappo che si trova sulla sacca di raccolta all'estremità libera del catetere.

10

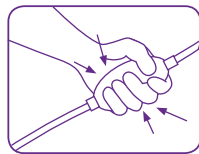

Aprirete il rubinetto per introdurre l'acqua nel retto aiutandovi con la pompa.

11



Rimuovete il tappo dal catetere. L'acqua e le feci defluiranno nella sacca di raccolta.

12



I passaggi illustrati nelle fig. 9, 10 e 11 possono essere ripetuti più volte, fino a quando non è stato raggiunto il risultato desiderato. Svuotate la sacca di raccolta e smaltite il catetere e la sacca di raccolta, in conformità con la normativa vigente.